


# ANLEITUNG MRAY LECTURE

## 1. MRAY AUFRUFEN

Öffnen Sie die für Sie bereitgestellte URL in Ihrem Browser.

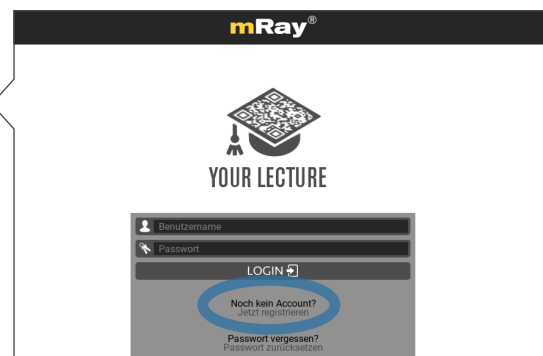

## 2. ERSTMALIGES REGISTRIEREN

- (1) Klicken Sie auf „Registrieren“ und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, ihren Namen und ein selbst gewähltes Passwort ein.
- (2) Setzen Sie ein Häkchen vor „Nutzungsbedingungen akzeptieren“ und klicken Sie dann auf „Registrieren“.
- (3) Folgen Sie dem Link, den Sie per Mail erhalten haben und melden Sie sich anschließend an.



## 3. BILDER HOCHLADEN



Zum Hochladen Ihrer **anonymisierten** Bilddaten klicken Sie unten rechts auf das Plus-Symbol und wählen die gewünschten Dateien aus.

Alternativ können Sie die Dateien per Drag & Drop direkt in die Anwendung ziehen.



## 5. BILDER TEILEN

- (1) Klicken Sie auf das Teilen-Symbol neben der hochgeladenen Studie.
- (2) Wählen Sie die Option „mRay web link“.
- (3) Aktivieren Sie die Einstellung „Einen Seminarlink für Lehrzwecke erstellen“. Achten Sie darauf, dass der Link zum Zeitpunkt der Präsentation noch gültig ist. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.
- (4) Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Im Kommentarfeld können Sie die Studie benennen z.B. Testcase 1. Klicken Sie anschließend „Link senden“.
- (5) In der E-Mail finden Sie einen QR-Code, den Sie einfach in Ihre Präsentationsfolien integrieren können.

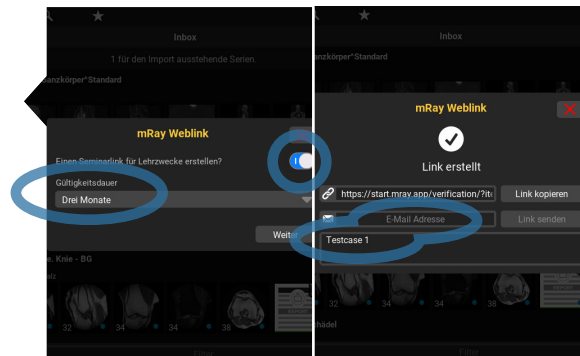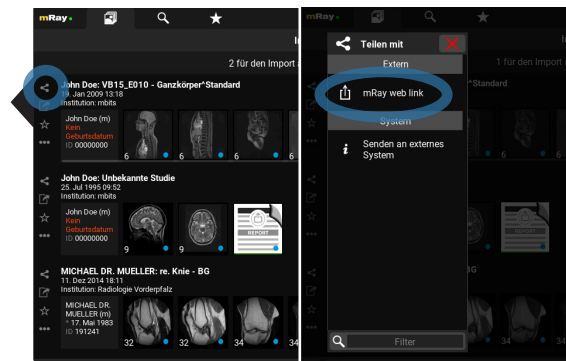

## 6. VERWENDUNG IN DER PRÄSENTATION

- (1) Kopieren Sie den QR-Code aus der E-Mail.  
Sollten Sie keine E-Mail erhalten haben, prüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner.
- (2) Fügen Sie den QR-Code in Ihre Präsentationsfolie ein.



## 8. LIVE DEMO

Während der Präsentation können Teilnehmende den QR-Code scannen und direkt auf die freigegebene Studie zugreifen. Neben dem Betrachten der Bilder ist auch eine aktive Mitarbeit möglich – etwa durch Annotationen oder andere Werkzeuge.

